

► Dräger Drugcheck® 3000

Solutions de test de dépistage de drogues



Caractéristiques techniques

Test de dépistage de drogues à partir d'un fluide oral. Le Dräger Drugcheck®3000 détecte les substances suivantes :

- Cocaïne (COC)
- Opiacés (OPI)
- Cannabis (T.H.C.)
- Amphétamines (AMP)
- Méthamphétamines (MET)

Dimensions (L x H x P) / Poids : 32 x 111 x 57 mm / < 30 g

Plage d'utilisation : fonctionnement : de 5°C à 40°C avec humidité relative de 5 à 95 %

Stockage / transport : de 4°C à 25°C

Temps de mesure :

- Mesure rapide : analyse < 3 minutes
- Mesure sensible : analyse < 5 minutes

Sélection du mode de mesure : en fonction de la durée de pré-incubation sélectionnée et du seuil de détection du THC souhaité, pour une lecture rapide ou plus précise.

Homologations / normes : homologué en tant que produit médical dans l'UE conformément à la Directive 98/79/IEC pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV) ; en France et en dehors de l'Union européenne pour une utilisation non médicale (non-DIV) ou pour une utilisation médico-légale (uniquement aux États-Unis)

Description du produit

Le test de dépistage de drogue compact et rapide à prélèvement salivaire offre des résultats fiables en plus d'être hygiénique et facile d'utilisation. L'appareil ne nécessite aucune alimentation électrique et peut être utilisé partout.

Effectuer des prélèvements facilement et de manière sûre Le dispositif de dépistage de substances **Dräger Drugcheck®3000** se compose de deux éléments : un collecteur absorbant pour recueillir un échantillon de fluide oral et une cassette de test pour l'analyse.

La cassette de test contient le liquide tampon et une fenêtre de lecture avec deux bandelettes réactives, qui affichent les lignes de contrôle et de test. Le test s'effectue en trois étapes faciles : prenez l'échantillon de fluide oral, secouez le kit de test, attendez une courte période d'incubation et commencez le test. L'indicateur coloré sur l'écouvillon disparaît aussitôt qu'il a absorbé assez de fluide oral pour le test.

Dès que les lignes de contrôle apparaissent dans la fenêtre, vous pouvez consulter les résultats. Si le résultat du test est négatif, une ligne apparaîtra à côté de la catégorie de substance (drogue) correspondante.

Cela signifie qu'aucune des substances cibles n'a été détectée dans l'échantillon. Si la ligne ne s'affiche pas à côté d'une catégorie de substance, alors le résultat pour cette substance est positif (lecture inversée).

► Analyse rapide et sensible

Contrôler des individus pour cinq catégories de substances simultanément avec le **Dräger Drugcheck®3000** : cocaïne, opiacés, amphétamines, méthamphétamines / drogues de synthèse (par ex. ecstasy) et cannabis (THC).

De toutes les catégories de substances mentionnées, le cannabis est la drogue la plus couramment consommée et fait partie

des composés chimiques les plus difficiles à identifier (THC). C'est pourquoi le **Dräger Drugcheck®3000** a été spécialement optimisé pour détecter le THC et offre maintenant deux options de mesure : en fonction de la durée d'attente choisie (pré-incubation) du test, il existe une option rapide avec un seuil de détection de THC élevée ou plus sensible avec un seuil plus faible.



Le test ne prend pas plus de 3 à 5 minutes.